
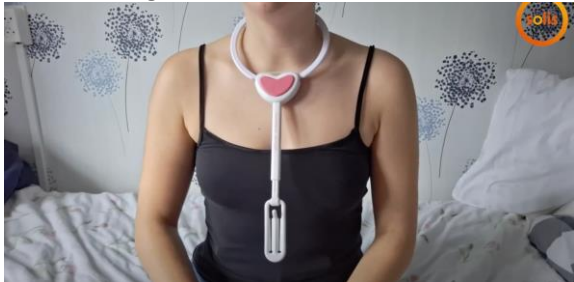


Handleiding Bra Angel

Stap 1: Starthouding		Ga zitten en positioneer de bra angel om uw nek. Pas de lengte aan zodat de grijper zich aan de onderkant van de borsten bevindt.
Stap 2: Beha positioneren		Pak de beha ondersteboven, binnenstebuiten en van achter naar voren vast.
Stap 3: Beha positioneren deel 2		Zet het haakeinde vast in de grijper.
Stap 4: Beha vastmaken		Leg uw kin op het roze hart zodat de bra angel niet verschuift. Pak ondertussen de andere kant van de beha en maak deze vast aan het haakeinde.
Stap 5 Beha verwijderen		De beha kan nu verwijderd worden van de bra angel en rond het lichaam worden bewogen zodat het aankleden voltooid is

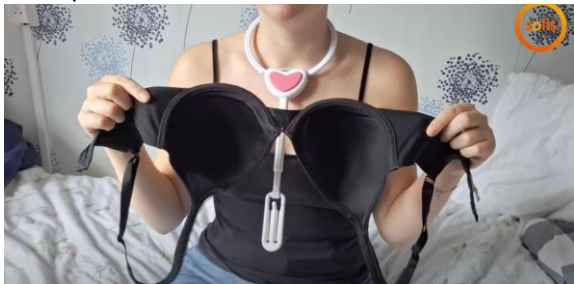