


Handleiding Cosmo



Cosmo Manual

Filisia Interfaces
71-75 Shelton Street
London, WC2H 9JQ
+44 (0)20 8133 4220
hello@filisia.com
www.filisia.com

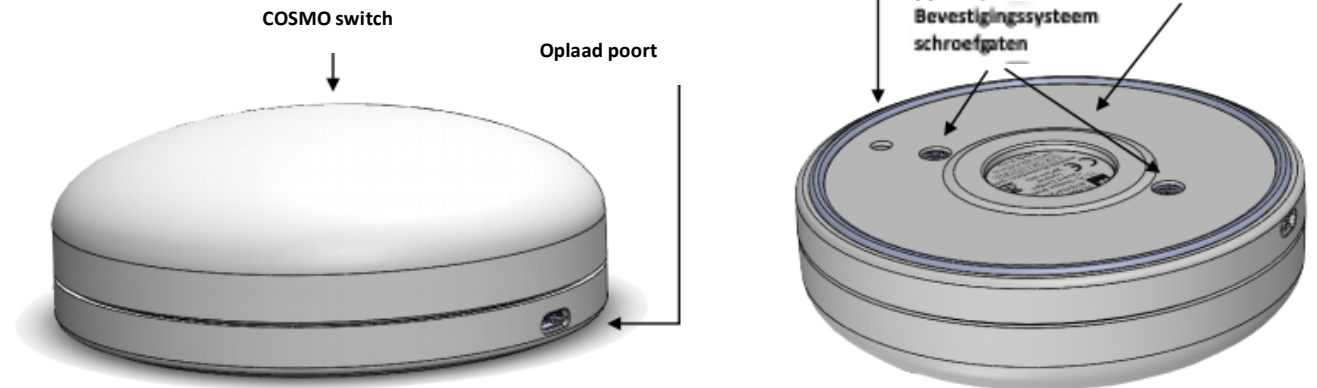

Over COSMO

Cosmo is een unieke, aanpasbare bluetooth-schakelaar die (a) werkt met de Cosmo iOS-app om toegang te geven tot tal van opleidings- en leeractiviteiten. (b) eenvoudige of meervoudige switch-toegang biedt tot apparaten zoals laptops, mobiele telefoons en tablets die worden uitgevoerd met Bluetooth LE compatibel en draai iOS, OS X, Windows en Android, Linux besturingssysteem.

Gebruik binnen de EU

Dit product kan in alle EU-lidstaten worden gebruikt.

Batterij opladen

De Cosmo Switch wordt aangedreven door een interne oplaadbare batterij accu. Laad de Cosmo Switch voor gebruik volledig op.

1. Selecteer de juiste muuradapter voor uw regio
2. Steek het micro-USB gedeelte van de wandoplader in de Micro-USB laadbus op de Cosmo Switch en plug de muuradapter in het stopcontact.
3. Tijdens het opladen heeft de schakelaar een gedimde oranje kleur. Als de schakelaar volledig is opgeladen, is deze groen gedimd van kleur.

Configuratie voor het gebruik van de COSMO-schakelaar met de COSMO-app

1. Zet de Cosmo switch aan.

Houd de aanknop aan de onderkant van het apparaat 1 seconde ingedrukt. Het apparaat licht wit op.

2. Open de Cosmo App

Download op uw IOS-apparaat de Cosmo Training-app. Je vindt deze op <https://apps.apple.com/gb/app/cosmo-training/id1150386521> of door te zoeken naar Cosmo Training in de appstore.

Maak een account aan en log in. De Cosmo zal direct verbinding maken met de app.

3. Om de Cosmo uit te schakelen, houdt u de aan/uit knop op de onderkant van het apparaat 3 seconden ingedrukt. Het apparaat licht op en gaat uit.

4. Als het apparaat zich in de HID-modus bevindt en u wilt het naar de Cosmo modus zetten, houdt dan de aanknop 7 seconden ingedrukt. Uw apparaat wordt uitgeschakeld en opnieuw opgestart en licht wit op. Ga dan verder met stap 2 hierboven.

Configuratie voor het gebruik van de Cosmo-schakelaar als een bluetooth-controller

1. Zet de Cosmo-schakelaar aan in de HID-modus. Druk de aanknoop aan de onderkant van het apparaat 8 seconden ingedrukt, totdat het apparaat begint te knipperen.

2. Selecteer het teken dat u wilt gebruiken. Druk op de aanknop eenmaal om de kleur, de Cosmo en de respectieve karakters te veranderen. De lijst met kleuren en karakters vindt u hieronder. Zodra u het teken heeft wat u wilt gebruiken, houdt u dan twee seconden de aan/uit knoop ingedrukt. De Cosmo gaat uit en wordt weer automatisch ingeschakeld, in de kleur/het teken dat u heeft geselecteerd.

Colour	Pattern	Value
	Slow on/off --__--	
Blue		Space
Green		Enter
Yellow		Arrow Up
Orange		Arrow Down
Red		Arrow Left
Purple		Arrow Right
Fuchsia		tab
Turquoise		Space - less sensitive
Rose		Enter - less sensitive
	Fast on/off ^^ ^^ ^^ ^^	
Blue		f3
Green		f5
Yellow		f7
Orange		f8
Red		f9
Purple		f10
Fuchsia		f11
Turquoise		f12
Rose		1

- In de Bluetooth-instellingen van uw apparaat selecteer COSMO HID.####.### waarbij ####het serienummer is (deze staat op de achterkant van het apparaat) en klik op "koppelen".
- Configureer eventuele instellingen voor Switch-toegang binnen de app die u wilt gebruiken met de Cosmo Switch.
- De Cosmo-Switch is nu klaar voor gebruik met uw apparaat en de app.
- Om de Cosmo switch met andere apparaten te koppelen, moet u ze eerst ontkoppelen. Ga naar je apparaat (computer, telefoon, tablet) Bluetooth-instellingen, selecteer de Cosmo switch die u wilt ontkoppelen met behulp van het Cosmo-serienummer die aan de onderkant van de Cosmo switch staat en klik op "ontkoppelen" of "vergeten"

Slaapstand

Na 30 minuten inactiviteit gaat de Cosmo Switch in slaapstand modus. Om de Cosmo uit slaapstand te halen, activeer de Comso Switch door de aanknop in te drukken en ongeveer 7 seconden te wachten zodat de Cosmo Switch zich opnieuw kan koppelen aan uw apparaat.

Extra informatie:

Bezoek www.filisia.com voor montageopties.