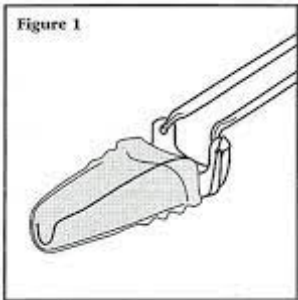
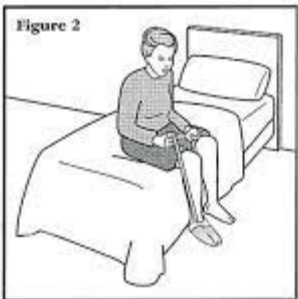


Handleiding EasyPull

Stap 1: Prepareren  Figure 1	Rol de sok op en trek de sok over het uiteinde van de Easy Pull sokaantrekker. Dus over uiteinde waar geen trekbanden aan zitten maar over de flexibele kunststof kern. Opmerking: voor eenhandig gebruik rolt u de sokaantrekker op en houdt u deze tussen de knieën. Hierna schuift u de sok over het uiteinde van de sokken aantrekker.
Stap 2: Plaatsen	Plaats de Easy pull sokaantrekker op de grond. Houd het uiteinde van de trekbanden vast. De nylon banden moeten strak aangetrokken zijn. Opmerking: voor eenhandig gebruik knoopt u de beide trekbanden aan elkaar waardoor één grote lus ontstaat.
Stap 3: Aantrekken  Figure 2	Steek uw voet in de Easy Pull sokaantrekker en trek de sokken aantrekker aan de lussen van de trekbanden omhoog totdat uw voet helemaal in de sok aantrekker zit.
Stap 4: Klaar!	Trek aan de lussen totdat uw sok volledig is aangetrokken en de Easy Pull sokaantrekker van uw voet glijdt.