


geheugenhulp
om te onthouden

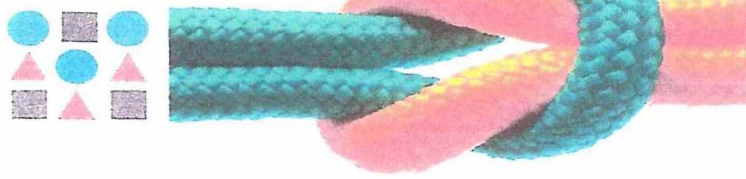

EASI – Timer

Om de EASI – timer aan te zetten, zet u de knop aan de onderkant van het apparaat op de stand ON, als u geluid wil, zet dan ook deze knop op ON.

Om de tijd in te stellen drukt u op de + of – knoppen. De tijd kan maximaal ingesteld worden op 99 minuten en 59 seconden.

Er zijn 8 groene knopjes waar u de tijd mee instelt. De twee linkse knoppen zijn voor de uren, de twee rechtse knoppen zijn voor de minuten. Met de bovenste groene knopjes gaat de tijd omhoog, met de onderste groene knopjes zet u de tijd omlaag.

Als de tijd is ingesteld drukt u op start/pauze knop die zich boven op het apparaat bevindt. De tijd begint te lopen en het groene licht zal gaan branden, en u zult een piepje horen. Wanneer de tijd half verstreken is, zal het licht veranderen naar oranje en zult u twee piepjes horen. Wanneer de timer nul heeft bereikt, zal het licht rood worden en zult u drie piepjes horen.

U kunt de timer pauzeren wanneer u maar wilt, door boven op de start/pauzeknop te drukken. Het licht zal gaan knipperen. Om de tijd weer te volgen drukt u simpelweg nog een keer op de start/pauze knop. Het licht zal weer gewoon gaan branden.

De timer kan op ieder gewenst moment stop worden gezet door op de X knop te drukken. (hiermee wordt ook de tijd gereset)

Om dezelfde tijd te herhalen, drukt u op de @ knop. (dit kan alleen wanneer de X knop niet is gebruikt.