

Handleiding Moofie ®

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Moofie, de sprekende beweegstok waarmee je kunt bewegen, spelen en luisteren. We helpen u graag om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met de Moofie. Op deze handleiding berust auteursrecht, net als op de Moofie Management Software. Niets hieruit mag zonder toestemming gekopieerd, veeleenvoudigd of anderszins gebruikt worden zonder nadrukkelijke toestemming.

Van toekomstige updates van de softwareapplicatie of de firmware van de Moofie krijgt u melding in de Moofie Management-applicatie. We zullen u hierover ook per mail informeren. Check dus altijd de mail die u via info@moofie.nl binnenkrijgt.

Waarschuwingen:

- Moofie is een beweegproduct dat primair bedoeld is voor gebruik binnenshuis. Kinderen dienen de Moofie onder toezicht te gebruiken. U bedient de Moofie met de handen. De Moofie is nadrukkelijk niet bedoeld om mee te slaan, mee te gooien of werpen, of te laten vallen. De Moofie kan wel tegen een stootje: de Moofie is voorzien van een stoot- en slagvaste behuizing van polycarbonaat. Daarnaast is de Moofie voorzien van foamrubberen handvatten. Deze dient u preventief te allen tijde over de eindkappen van de Moofie te plaatsen tijdens gebruik. Wanneer u de Moofie in het laadstation zet, schuift u het handvat aan die zijde omhoog.
- De Moofie is niet waterdicht. De behuizing is spatwaterdicht.
- Gebruik alleen de meegeleverde witte adapter van het merk Goobay en de meegeleverde hi-speed usb-kabel. Gebruik van een andere adapter en usb-kabel kan schade aan de Moofie geven, wat nadrukkelijk buiten de garantie valt.
- Laadt de Moofie minimaal 3 uur op voordat u 'm voor het eerst gaat gebruiken. Plaats de Moofie hiervoor in het laadstation met de adapter daaraan gekoppeld, of koppel de adapter direct aan de Moofie.
- Laat het zilvergrijze stickertje met daarop o.a. het serienummer op de Moofie zitten, t.b.v. evt. gebreken of klachten.

Meegeleverd:

Moofie wordt geleverd met een softwareprogramma 'Moofie Management Software'. In deze softwareapplicatie is een uitgebreide database met oefeningen, programma's, spellen en luisterboeken/muziekfragmenten opgenomen. Met deze applicatie zet u eenvoudig (nieuwe) beweegprogramma's, spellen en audiobestanden op de Moofie. Via de webshop op www.moofie.nl leveren wij doorlopend nieuwe oefeningen, programma's, spellen en luisterboeken/muziekfragmenten in pakketvorm aan.

De volgende accessoires worden standaard meegeleverd bij aanschaf van een Moofie: een laadstation met een (los te koppelen) laadadapter, een usb-kabel, twee beschermende handvatten van foam. Deze handvatten zijn aan twee zijden te gebruiken: een zwart/wit gestreepte zijde en een off-white zijde.

Optioneel zijn de volgende accessoires verkrijgbaar: externe speaker (getest i.c.m. de Moofie), extra handvatten. Alles is te verkrijgen via de webshop.

Moofie Management Software:

De applicatie Moofie Management Software is compatibel met besturingssystemen Windows Vista, Windows 7, 8 en Windows 10. Gebruikt u een verouderde versie, upgrade deze dan naar 1 van de genoemde besturingssystemen. Uw firewall moet het protocol SFTP met poort 22 toelaten. Deze poort wordt gebruikt om gegevensuitwisseling via internet te doen.

Het Moofie Management Softwareprogramma staat op de meegeleverde usb-stick. Dubbelklik op het bestand 'StartMoofieApp.cmd' om de applicatie te openen en te gebruiken. U kunt de applicatie ook eenmalig installeren op uw laptop of computer. Ga in dat geval naar de map INSTALLATIE PC op de usb-stick, en dubbelklik op het MoofieCareInstaller- of MoofieKidsInstaller-bestand om de installatie te starten.

Let op: U kunt zowel de Care-versie als de Kids-versie op uw laptop of pc installeren. Installeer bij een herhalingsaankoop niet voor een tweede keer de Care- of Kids-applicatie op dezelfde laptop of pc. U raakt dan uw zelfgemaakte beweegprogramma's kwijt.

De handleiding van de Moofie Management Software, is te downloaden via een downloadlink in uw aankoopmail. Deze handleiding staat ook op de meegeleverde usb-stick in de map 'MOOFIE' en onder 'Handleidingen' in het beginscherm van de softwareapplicatie. Hierin vindt u alle informatie die u nodig hebt om met het softwareprogramma o.a. oefeningen en beweegprogramma's te maken, te wijzigen en te uploaden naar de Moofie-stok.

Reiniging

Reinig de behuizing met een licht vochtige microvezeldoek, **let op dat er geen water in de open usb-aansluiting komt (!)**, of met een vochtig (brilpoets)doekje. Vervang i.v.m. de hygiëne de handvatten met enige regelmaat. Deze zijn verkrijgbaar via de webshop op onze website www.moofie.nl.

Algemene productbeschrijving

Bewegen

Moofie is primair ontwikkeld om mensen individueel of met meerderen in beweging te brengen. Dit kan zijn omdat ze (te) weinig bewegen, moeilijk bewegen door ziekten of aandoeningen, moeten revalideren of omdat ze de positieve effecten van (méér) bewegen inzien. Bewegen geeft gezondheidswinst. Op welke manier dan ook. Met de Moofie wordt bewegen bovenal FUN!

Bij aanschaf staan er standaard 6 of 24 door ons voorgeprogrammeerde beweegprogramma's op de Moofie, afhankelijk van of u de Moofie Care, Kids of een Pro-versie daarvan hebt aangeschaft. U vindt deze beweegprogramma's ook terug in uw database in het Moofie Management softwareprogramma onder 'Programma's'. vanuit deze database kunt u wanneer u wilt de programma's op de Moofie verwisselen met andere programma's. De volgende beweegprogramma's staan al op de Moofie:

Moofie Care:

- Programma 1: Muziek armen zittend 1
- Programma 2: Muziek armen zittend 2
- Programma 3: Muziek armen en benen zittend 1
- Programma 4: Muziek armen en benen zittend 2
- Programma 5: Armen zittend 1
- Programma 6: Programma 1 tweetallen

Moofie Care Pro:

- Programma 1: Muziek armen zittend 1
- Programma 2: Muziek armen zittend 2HN
- Programma 3: Muziek armen zittend 3
- Programma 4: Muziek armen zittend 4HN
- Programma 5: Muziek armen en benen zittend 1
- Programma 6: Muziek armen en benen zittend 2H
- Programma 7: Muziek armen en benen zittend 3
- Programma 8: Muziek armen en benen zittend 4HN
- Programma 9: Armen zittend 1
- Programma 10: Armen zittend 2HN
- Programma 11: Armen en benen zittend 1
- Programma 12: Armen en benen zittend 2HN
- Programma 13: Muziek armen en benen zittend en staand 1
- Programma 14: Muziek armen en benen zittend en staand 2HN

- Programma 15: Armen en benen zittend en staand 1
- Programma 16: Armen en benen zittend en staand 2HN
- Programma 17: Bovenlichaam zittend 1HN
- Programma 18: Bovenlichaam zittend 2
- Programma 19: Programma 1 tweetallen
- Programma 20: Programma 2 tweetallen
- Programma 21: Programma 3HN tweetallen
- Programma 22: Programma 4HN tweetallen
- Programma 23: Cognitie en coördinatie 1
- Programma 24: Cognitie en coördinatie 2HN

Moofie Kids:

- Programma 1: Muziek armen zittend 1K
- Programma 2: Muziek armen zittend 2K
- Programma 3: Kinderen Actief 1
- Programma 4: Kinderen Actief 2
- Programma 5: Kinderen Actief 3
- Programma 6: Energizer K1

Moofie Kids Pro:

- Programma 1: Muziek armen zittend 1K
- Programma 2: Muziek armen zittend 2K
- Programma 3: Muziek armen zittend 3K
- Programma 4: Muziek armen zittend 4K
- Programma 5: Muziek armen en benen zittend 1
- Programma 6: Muziek armen en benen zittend 2
- Programma 7: Muziek armen en benen zittend 3
- Programma 8: Muziek armen en benen zittend 4
- Programma 9: Programma 1K tweetallen
- Programma 10: Programma 2K tweetallen
- Programma 11: Programma 3K tweetallen
- Programma 12: Programma 4K tweetallen
- Programma 13: Kinderen Actief 1
- Programma 14: Kinderen Actief 2
- Programma 15: Kinderen Actief 3
- Programma 16: Kinderen Actief 4
- Programma 17: Kinderen Actief 5
- Programma 18: Kinderen Actief 6
- Programma 19: Energizer 1
- Programma 20: Energizer 2
- Programma 21: Energizer 3
- Programma 22: Energizer 4
- Programma 23: Muziek armen en benen zittend en staand 1K
- Programma 24: Muziek armen en benen zittend en staand 2K

Let op: mogelijk zijn (enkele) beweegprogramma's die nu op de Moofie staan niet geschikt voor uw beoogde doelgroep. Zeker bij kinderen kan de gebruikersdoelgroep van de Moofie cognitief en motorisch sterk variëren. Daarom vindt u in de Moofie Management Softwareapplicatie nog vele extra voorgeprogrammeerde beweegprogramma's. U kunt deze in de applicatie afspelen, wijzigen en uploaden naar de Moofie. Of u maakt heel eenvoudig zelf nieuwe beweegprogramma's, afgestemd op uw wensen en beweegmogelijkheden of die van uw gebruikersdoelgroep(en). Zie hiervoor de App handleiding onder punt 4.

Spellen, luisteren, lamp, herinneringsfunctie

Naast bewegen kunt u met de Moofie (beweeg)spellen doen of naar boeken of muziek luisteren. Bij aanschaf staan er standaard resp. 3, 6, 23 of 24 spellen op de Moofie, afhankelijk van of u de Moofie Care, Kids, care Pro of Kids Pro hebt aangeschaft. De volgende spellen staan al op de Moofie als u 'm uit de verpakking haalt:

Moofie Care:

- Spel 1: Dierenspel
- Spel 2: Memoryspel
- Spel 3: Muziekspel
- Spel 4 t/m 6 zijn (nog) leeg

Moofie Care Pro:

- Spel 1: Dierenspel
- Spel 2: Memoryspel
- Spel 3: Muziekspel
- Spel 4: Na-aanspel
- Spel 5: Ik zie ik zie wat jij niet ziet spel
- Spel 6: Pim Pam Kleurenpaletspel
- Spel 7 t/m 24 zijn (nog) leeg


Moofie Kids:

- Spel 1: Dierenspel
- Spel 2: Memoryspel
- Spel 3: Muziekspel
- Spel 4: Na-aanspel
- Spel 5: Stoelendans
- Spel 6: Alle tafels door elkaar spel (bewegend leren)

Moofie Kids Pro:

- Spel 1: Dierenspel
- Spel 2: Memoryspel
- Spel 3: Muziekspel
- Spel 4: Na-aanspel
- Spel 5: Stoelendans
- Spel 6: Ik zie ik zie spel
- Spel 7: Pim Pam Kleurenpaletspel
- Spel 8: Plussommen tot 10
- Spel 9: Plussommen tot 20
- Spel 10: Minsommen tot 10
- Spel 11: Minsommen tot 20
- Spel 12: Tafel van 2
- Spel 13: Tafel van 5
- Spel 14: Tafel van 10
- Spel 15: Tafel van 3
- Spel 16: Tafel van 4
- Spel 17: Tafel van 6
- Spel 18: Tafel van 7
- Spel 19: Tafel van 8
- Spel 20: Tafel van 9
- Spel 21: Alle tafels door elkaar
- Spel 22: Plussommen tot 100
- Spel 23: Minsommen tot 100
- Spel 24: leeg

Indien de Moofie in het laadstation staat, kunt u deze als staande, dimbare lamp gebruiken. Tenslotte heeft de Moofie, via een optionele productuitbreiding die via de webshop beschikbaar is, een herinneringsfunctie. Herinneringen kunnen vanuit de Moofie Management Softwareapplicatie geprogrammeerd worden. De Moofie spreekt op de ingegeven datum en tijd hardop de ingegeven herinnering uit, ondersteunt door licht en enkele subtiele aankondigingstonen. De gesproken herinnering herhaalt zich om de paar minuten, totdat de herinnering wordt 'uit' gezet d.m.v. het aanraken van 1 van de segmenten van de Moofie of vanzelf uitgaat. U stelt zelf de terugkeerfrequentie in van de betreffende herinnering (elke dag, elke week, alleen op maandagen etc.).

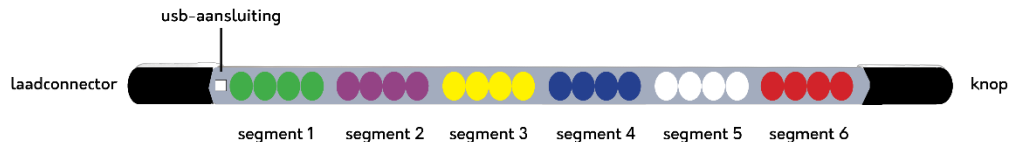

Het product

De Moofie bestaat uit een buis met aan weerszijden twee eindkappen met speakers. In de ene eindkap bevindt zich een knop, in de andere een laadconnector. In de buis aan de kant van de laadconnector zit de opening voor aansluiting van de meegeleverde usb-kabel met uw laptop of computer.

De buis is verdeeld in 6 segmenten. Deze segmenten kunnen afzonderlijk in diverse kleuren oplichten. Na inschakeling met de knop bedient u de Moofie steeds door het vastpakken van segmenten. Moofie spreekt hardop uit welk segment welke optie betreft, en begeleidt deze keuzes met knipperende leds van het betreffende segment.

In het laadstation kan de Moofie worden opgeladen of worden gebruikt als staande lamp.

Functionaliteiten knop en laadconnector

Zwarte knop:

- Hiermee zet u de Moofie aan
- Hiermee gaat u vanuit een (sub)menu (bewegen, spelen, luisteren) terug naar het hoofdmenu
- Hiermee breekt u tijdens het afspelen van een oefening de oefening af en gaat u naar de volgende oefening
- Hiermee breekt u tijdens het afspelen van een spel/luisterfragment het spel of luisterfragment af en gaat u terug naar het spelmenu of luistermenu
- Hiermee kunt u de Moofie resetten door de knop 6 sec. ingedrukt te houden.
- LET OP: de Moofie schakelt niet uit door op de zwarte knop te drukken. U schakelt de Moofie uit door in het hoofdmenu het rode vlak aan te raken.

Laadconnector:

- Staand opladen in het laadstation (adapter koppelen aan meegeleverd laadstation)
- Opladen met losse adapter (loskoppelen van het laadstation)

Aan de slag met de Moofie

Als u de Moofie gaat gebruiken hanteer dan de volgende werkwijze:


- Zorg ervoor dat u de Moofie bij ontvangst eerst voldoende oplaadt gedurende drie uur. Tijdens het laden ziet u naast de usb-aansluiting een rood lampje knipperen. Eerst snel, later langzaam.
- Plaats aan weerszijden van de Moofie de beschermende foam rubberen handvatten om de eindkappen. Kies zelf of u de zwart/witte kant of de off-white kant (dan keert u de handvatten binnenste buiten) zichtbaar wilt hebben. Bij voorkeur steken de handvatten iets uit over de eindkappen.
- Leg de Moofie op tafel.
- Druk op de zwarte knop aan het uiteinde van de Moofie. Hou daarbij de Moofie niet vast op de buis, maar op 1 van de handvatten.
- De leds lichten op, u hoort 'Hallo, ik ben Moofie' en het hoofdmenu wordt uitgesproken, ondersteund met knipperende led-verlichting. Kies vervolgens door een segment vast te pakken.

Hoofdmenu

U krijgt 6 keuzes, die u maakt door het betreffende kleursegment vast te pakken:

- Groen: bewegen
- Paars: spelen
- Geel: luisteren
- Blauw: instellingen
- Wit: lamp
- Rood: uitschakelen Moofie

Hoofdmenu

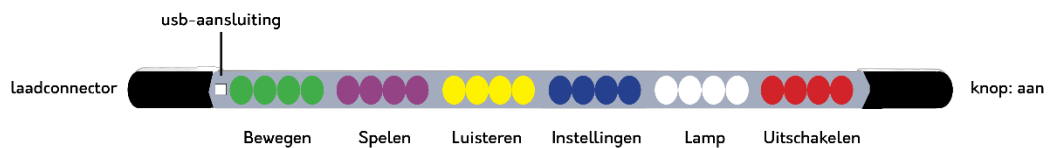


Hierna wordt op elke keuze vanuit het hoofdmenu kort ingegaan.

Groen: Bewegen

U hoort 'Kies een programma' of, in het geval van de pro-versie, een sub-beweegmenu. Alle segmenten knipperen waaronder programma's kunnen staan, ongeacht of er daadwerkelijk een programma onder staat.

Beweegmenu

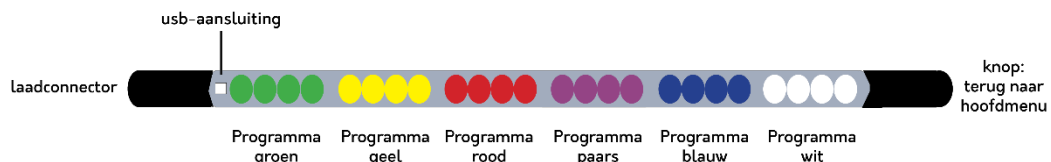

U maakt een keuze door 1 van de segmenten aan te raken. Hoort u nogmaals: 'Kies een programma' dan staat er onder dat segment geen programma en kiest u een ander segment. Vervolgens wordt het beweegprogramma dat onder dat segment staat afgespeeld. U volgt de gesproken commando's op en voert het beweegprogramma uit. Nadat uw beweegprogramma is afgelopen hoort u 'Einde programma. Leg mij nu op tafel neer. Over enkele seconden volgt het Hoofdmenu'.


Drukt u op de zwarte knop tijdens een oefening, dan volgt direct de volgende oefening. U kunt zo het programma snel doorlopen.

In het Moofie Management Softwareprogramma kunt u, als de Moofie gekoppeld is met uw laptop of pc, zien welke beweegprogramma's er op dat moment op de Moofie staan. Vanuit deze applicatie kunt u de programma's onder de segmenten wisselen wanneer u wilt. Zie hiervoor de handleiding Moofie Management Software.

Paars: Spelen

U hoort 'Kies een spel' of, in het geval van de pro-versie, een sub-spelmenu. Alle segmenten knipperen, ongeacht onder welke segmenten daadwerkelijk een spel staat.

Spelmenu

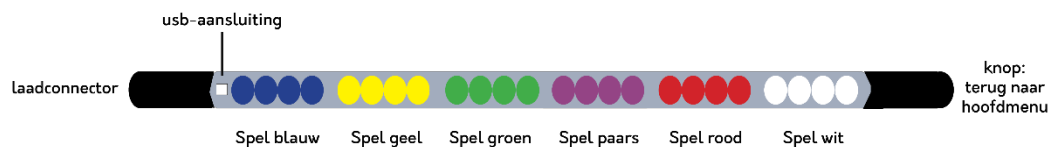

U maakt een keuze door 1 van de segmenten aan te raken. Vervolgens wordt het spel dat onder dat segment staat afgespeeld. U volgt de gesproken commando's op en voert het spel uit. Nadat het spel ten einde is hoort u 'Einde spel'. Leg mij nu op tafel neer. Over enkele seconden volgt het Hoofdmenu'.

Als u het spel tijdens het spelen wilt afbreken drukt u op de knop. U komt terug in het Spelmenu en hoort 'Kies een spel'. Indien u nu nogmaals de knop indrukt, komt u terug in het hoofdmenu.


Als er onder het segment dat u kiest geen spel staat, hoort u opnieuw 'Kies een spel'. Kies een ander segment waar wel een spel onder staat. Of programmeer vanuit de Moofie Management Software onder elk segment een spel.

In het Moofie Management Softwareprogramma kunt u, als de Moofie gekoppeld is met uw laptop of pc, zien welke spellen er op dat moment op de Moofie staan. Vanuit deze applicatie kunt u de spellen onder de segmenten wijzigen wanneer u wilt. Zie hiervoor de handleiding Moofie Management Software.

Geel: Luisteren

U hoort 'Kies een luisterboek of muziknummer'. Alle segmenten knipperen, ongeacht onder welke segmenten daadwerkelijk een luisterfragment staat.

Luisterenmenu

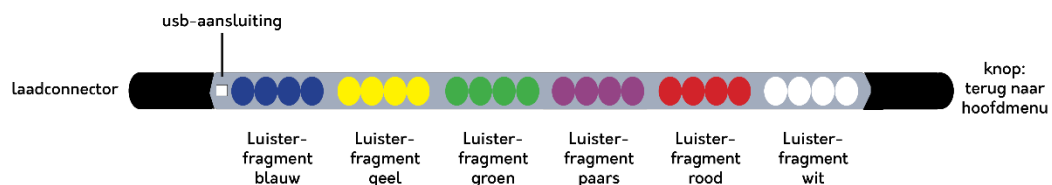

U maakt een keuze door 1 van de segmenten aan te raken. Vervolgens wordt het luisterboek of muziknummer dat onder dat segment staat afgespeeld. Nadat het audiofragment ten einde is hoort u 'Einde luisterfragment. Leg mij nu op tafel neer. Over enkele seconden volgt het Hoofdmenu'.

Als u tijdens het afspelen het luisterfragment wilt afbreken drukt u op de knop. U hoort dan 'Einde luisterfragment. Leg mij nu op tafel neer. Over enkele seconden volgt het Hoofdmenu'.


Als er onder het segment dat u kiest geen luisterfragment staat, hoort u opnieuw 'Kies een luisterboek of muziknummer'. Kies een ander segment waar wel een luisterboek of muziknummer onder staat. Of programmeer vanuit de Moofie Management Software onder elk segment een luisterboek of muziknummer.

In het Moofie Management Software-programma kunt u, als de Moofie gekoppeld is met uw laptop of pc, zien welke luisterboeken of muziknummers er op dat moment op de Moofie staan. Vanuit de Moofie Management Software kunt u de luisterboeken en muziknummers onder de segmenten wijzigen wanneer u wilt. U kunt ook muziek of luisterboeken die op uw eigen computer of laptop staan naar de Moofie uploaden. Zie hiervoor de handleiding Moofie Management Software.

Blauw: Instellingen

U hoort 5 keuzes onder 'Instellingen', ondersteund door knipperende led-verlichting:

Menu instellingen

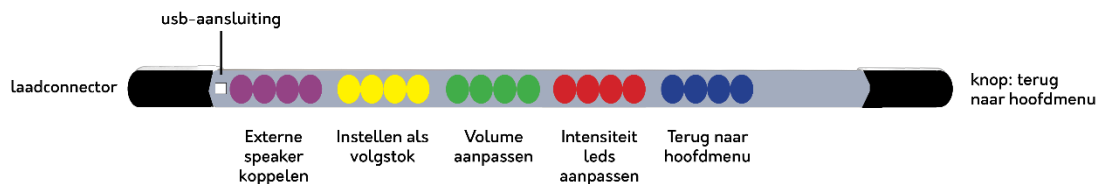

- **Paars: de Moofie koppelen aan een externe speaker.**
Zet de externe speaker pas aan nadat u het paarse segment gekozen heeft en het paarse lampje ziet lopen. Zorg dat de bluetooth op de speaker aanstaat. Moofie zoekt de speaker. Na koppeling wordt op de speaker het hoofdmenu afgespeeld. Bij het ontkoppelen van de speaker wordt de audio direct terug overgenomen door de Moofie.
- **Geel: deze Moofie als 'volgstok' instellen.**
Zorg dat een andere Moofie zich in de buurt bevindt en ook *aan* staat om de Moofies succesvol aan elkaar te koppelen. U ziet een geel lampje lopen terwijl de koppeling tussen de twee Moofies wordt gemaakt. Na koppeling gaat de als 'volgstok' ingestelde Moofie de 'master'-Moofie volgen: de leds gaan precies gelijktijdig. Deze optie is extra leuk wanneer u twee Moofies ter beschikking hebt en u met twee of meer personen samen gaat bewegen. Of wanneer een gebruiker cognitief of fysiek minder in staat is de (beweeg)commando's van de Moofie op te volgen. Deze gebruiker kan de andere gebruiker door deze koppel functie zo goed als mogelijk gaan 'volgen' in zijn bewegingen.
NB: de Moofie die als volgstock ingesteld wordt kan niet gelijktijdig aan een externe speaker gekoppeld worden. De masterstok kan dat wel. Koppel eerst de Moofies aan elkaar als master- en volgstock, en dan pas de speaker aan de masterstok.
- **Groen: volume aanpassen.**
U krijgt de keuze tussen groene vlak aanraken= volume harder, of rode vlak aanraken=volume zachter. Raak het groene of rode vlak zo vaak aan totdat het gewenste volume is bereikt. Door het aanraken van het blauwe vlak, of het indrukken van de knop, keert u terug naar het hoofdmenu.
- **Rood: de intensiteit van de leds aanpassen**
U krijgt de keuze tussen het aanraken van de gele leds=leds feller, of de groene leds=leds minder fel. Raak de gele of groene leds zo vaak aan totdat de gewenste intensiteit van de leds is bereikt. Door de knop in te drukken keert u terug naar het hoofdmenu.
- **Blauw: terugkeren naar hoofdmenu**
U komt terug in het hoofdmenu en kunt weer kiezen tussen alle opties uit het hoofdmenu.

Wit: Lamp

De lamp gaat aan en u krijgt de keuze om via de onderste drie segmenten die knipperen de lamp feller te laten branden, of via de bovenste drie segmenten die knipperen de lamp minder fel te laten branden. Houd (1 van) de segmenten naar keuze net zolang vast tot u de gewenste lampintensiteit hebt bereikt. U kunt de lamp in het laadstation zetten, zodat de batterij gelijktijdig oplaadt. Wanneer u de lamp op volle sterkte laat branden terwijl u de Moofie niet in de lader hebt, is de batterij na ong. 2-3 uur leeg.

Via de knop keert u terug naar het hoofdmenu.

Rood: Moofie uitschakelen

Door het rode segment vast te pakken gaat de Moofie in de 'stand-by' stand. In deze stand wordt een minimale hoeveelheid van de batterij verbruikt. U kunt de Moofie na uitschakelen ook in het laadstation zetten.

De accu opladen

Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter van het merk Goobay.

Lage accucapaciteit

Wanneer de batterij leeg aan het geraken is, zal in eerste instantie de intensiteit van de leds afnemen om u te attenderen op de lage batterijspanning. U dient de Moofie na het gebruik minimaal een uur op te laden.

Wanneer de Moofie 'battery low' aangeeft, is de spanning minimaal. De Moofie schakelt vanzelf in de stand-by stand. U dient de Moofie dan gedurende 2-3 uren op te laden, alvorens 'm weer te gebruiken.

Tijdens het opladen ziet u een rood indicatorlampje knipperen naast de usb-aansluiting. Eerst snel, na verloop van tijd langzaam.

Problemen

Ondervindt u een probleem met de Moofie?

- Voer dan eerst een reset uit: Houd de knop op de Moofie gedurende zo'n 6 seconden ingedrukt om de Moofie te resetten. Wacht af of het hoofdmenu opnieuw opstart en of de Moofie daarna weer naar wens werkt.
- Is het probleem niet opgelost? Dan is mogelijk de batterij leeg. Koppel de Moofie met de losse adapter aan een stroompunt of zet de Moofie in het laadstation (vergeet de adapter niet in het stopcontact te doen) gedurende minimaal 2 - 3 uur. U ziet naast de usb-aansluiting een rood lampje knipperen, eerst snel, na een tijdje langzaam.

Ondervindt u een probleem tijdens de installatie of het gebruik van de Moofie Management Software?

- Check de HandleidingMoofieManagementSoftware in de map MOOFIE op uw usb-stick, of de 'App Handleiding' in het beginscherm van de softwareapplicatie onder Handleidingen.

Wanneer u tegen andere problemen aanloopt tijdens het gebruik van de Moofie, probeert u het probleem dan zo goed mogelijk richting ons te onderbouwen, bij voorkeur met korte filmopnames d.m.v. uw telefoon zodat we zien wat er gebeurt. Stuur deze met een toelichting naar info@moofie.nl (evt. via www.wetransfer.com bij grote bestanden) met vermelding van uw telefoonnummer en we nemen z.s.m. terug contact met u op.

Hebt u vragen, opmerkingen, wensen of adviezen voor ons? Neem contact met ons op. Telefonisch: 038-4290202 of per e-mail: info@moofie.nl. Voor onze algemene, leverings- en garantievoorwaarden verwijzen we u naar onze website. Ook vindt u daar ons privacybeleid.

Technische gegevens

Voeding: Adapter input 100–240V AC, output 12V DC. Uitgang stroomsterkte max. 1A.

Batterij: Lithium-ion rechargeable cell Model name : INR18650–35^E


Usb-kabel: hi-speed 2.0 usb B kabel

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT MOOFIE (HANDELEND VANUIT FITTEBEDRIJVEN.NL)



WWW.MOOFIE.NL

CE

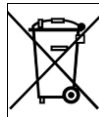

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker erop te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Fittebedrijven.nl (Moofie is een handelsnaam van Fittebedrijven.nl)

Pilotenlaan 30

8017 GD ZWOLLE

T: 038-4290202

E: info@moofie.nl

W: www.moofie.nl