

Korte handleiding verplaatsbare handgrepen

Stap 1: Schoonmaken	Maak het oppervlak en de zuignappen stof en watervrij.
Stap 2: Vacuüm zuigen	Open de schakelaars van elke kant. Druk de handgreep op de wand tot dat hij vacuüm is gezogen.
Stap 3: Vastzetten	Als de handgreep vacuüm gezogen is sluit je de schakelaars naar beneden. Controleer of de beugels voldoende vastzitten door hier met enige kracht aan te trekken.
Stap 4: Losmaken	Het handvat kan gemakkelijk worden verwijderd door de schakelaars weer omhoog te trekken.