

Sensohond Lenny

Lenny met zijn schattige gezicht met de grote ogen betovert alleen al door ernaar te kijken, verleid je om het aan te raken en straalt een gevoel van veiligheid uit.

De zachte kop laat zich heerlijk verkreukelen en kneden. Als gevolg hiervan verandert Lenny voortdurend zijn gezichtsuitdrukkingen. Het gewicht van ca. 2 kg is precies goed om de proprioceptie met lichte druk te bevorderen.

De combinatie van zacht microvelours en stabiel 3D speciaal textiel stimuleert het sensorische systeem van de huid, dat prikkels ervaart.

Maar Lenny kan meer!

Binnen in Lenny zorgt een verwijderbare trilstaaf (meegeleverd) voor trillingen die op verschillende intensiteiten kunnen worden ingesteld. Een nog intensievere stimulatie - vooral van de handen - is mogelijk.

Lenny wordt een waardevolle metgezel, vooral in de geriatrie.

Hoe in te zetten:

Lenny kan meerdere keren per dag gebruikt worden. Leg Lenny op schoot, of draag Lenny met een arm tijdens het lopen. In principe is een 20-25 minuten gebruik op schoot of dragen genoeg, maar als de gebruiker langer wil kan dit geen kwaad. Er treedt alleen gewenning op. De uitwerking is zo'n 1,5 tot 2 uur, waardoor het opnieuw aanbieden van Lenny na die 2 uur geadviseerd wordt.

Let op! Als de gebruiker niet goed kan aangeven hoe het voelt, observeer hoe de gebruiker erop reageert. Kijk hierbij naar mimiek, lichaamshouding, uittrekken van het product, verzet en/of verstarring.

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op via onderstaande gegevens.

Per telefoon: 033-4320044

Per e-mail: info@sarkow.nl

Elke Lenny is handgemaakt door de productie van Beluga. Zij hechten bijzonder belang aan een zorgvuldige, consistente verwerking en hoogwaardige materialen.

Materiaal: speciaal textiel, 100% polyester, geschikt voor mensen met allergieën
Vulling: polymeerballen

Onderhoud: machine wasbaar tot 40 graden (verwijder eerst de trilmodule!)
Was zonder centrifugeren.
Niet drogen in de wasdroger