

Het Pactive Motion systeem

U gaat werken met een innovatief en geavanceerd therapeutisch hulpmiddel. Wij hopen dat u met plezier met PM zult werken en dat uw cliënten er veel baat bij zullen hebben.

Installatie

De stoel is gereed voor gebruik zodra aangesloten op het lichtnet en een TV. Daartoe worden een elektrische aansluitkabel van 5 meter en een HDMI kabel van 5 meter meegeleverd aan de achterzijde van de stoel.

Om de stoel te kunnen gebruiken moet:

- De TV op het lichtnet zijn aangesloten
- De TV aanzetten
- De meegeleverde HDMI kabel worden aangesloten op de HDMI-1 ingang van de TV
- De TV via source  worden ingesteld op de HDMI-1 ingang
- Gecontroleerd worden of de HDMI kabel aan de achterzijde van de stoel via het meegeleverde koppelstuk ook aan de HDMI kabel aan de achterzijde van de stoel zit.
- De stoel pas op het lichtnet aansluiten als de tv aan staat.
- Na ca. 30 seconden verschijnt er beeld op het beeldscherm op de armleuning en is de stoel gereed voor gebruik.



BELANGRIJKE GEBRUIKSINSTRUCTIE:


1. Altijd bij gebruik de rem op de wielen activeren.
2. De stoel bevat een elektrisch bediende sta-op  functie die via de afstandsbediening (in de pochet aan de achterzijde) kan worden gebruikt.
3. De beweegfuncties van de stoel mogen alleen gebruikt worden in de **laagste** sta-op stand.
4. Om het comfort te vergroten kan de rug  van de stoel elektrisch worden versteld met behulp van de afstandsbediening.




5. De voetenbank is zelf instellend en kan door te drukken worden gefixeerd.

BEDIENINGSINSTRUCTIE


Zorg dat de remmen zijn geactiveerd, de sta-op in de laagste stand staat en de gebruiker comfortabel zit.

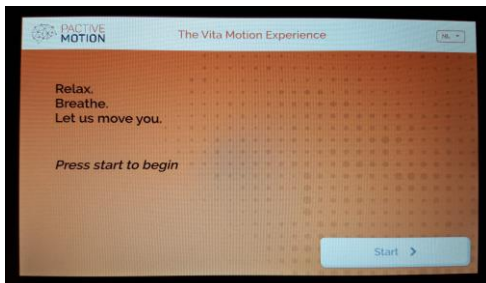


Druk op start

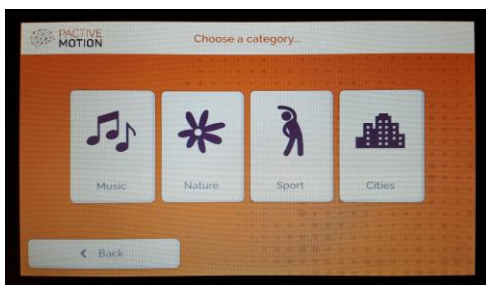

Kies een thema

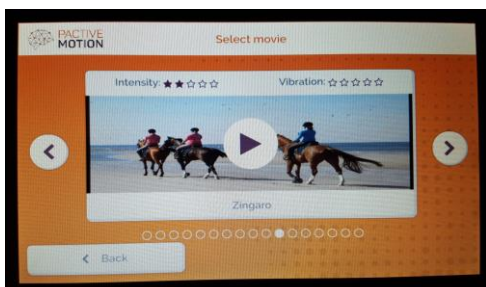

Kies een film en start de film of ga terug

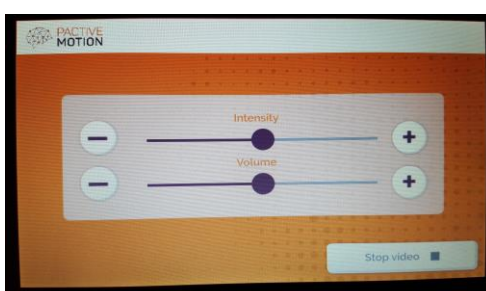

Stel desgewenst de beweegintensiteit in en het volume

Na afloop verschijnt weer het start scherm en tijdens een film kan men ook stoppen.

HELP

Net als iedere computer kan ook het Pactive Motion systeem wel eens haperen. In dat geval de schakelaar met het rode lampje achter op de stoel uitzetten en na 1 minuut weer aanzetten of de stekker uit het stopcontact nemen en na 1 minuut weer aansluiten. Na ca. 30 seconden gaat het systeem zich resetten en is daarna klaar voor gebruik.

Verder nog een paar tips:

- Als de TV geen beeld geeft controleer dan of:
 - de TV aan staat
 - de TV op de juiste HDMI is afgestemd (m.b.v. source op de afstandsbediening van de tv)
 - de HDMI kabel goed vast zit op de TV
 - de HDMI kabel goed vastzit aan de stoel
 -
- Als het geluid te zwak is stel dan het geluid van de TV hoger zetten

BIJ EEN ECHTE STORING GRAAG EEN EMAIL ZENDEN NAAR:

INFO@PACTIVEMOTION.NL

Vergeet niet te vermelden wat het probleem is, het adres, je naam en het telefoonnr van de contactpersoon.

of een SMS bericht zenden naar 06516450 99.